



SoToxa™

Test de drogas en saliva

Nuevo

Usos


Detección rápida de drogas en fluidos orales.

- Específico para detectar droga en la calle.
- Ideal para campañas de tráfico y control a conductores.

SoToxa™ es un sistema portátil para detección de drogas en conductores que destaca por su precisión y facilidad de uso. En tres sencillos pasos puede determinar si un conductor ha consumido algún tipo de droga por medio del análisis de su saliva, detectando múltiples sustancias: THC cannabis, cocaína, opiáceos, anfetaminas y metanfetaminas.

Evita la interpretación de resultados

Máximo rigor en 5 minutos
Impresión de pruebas

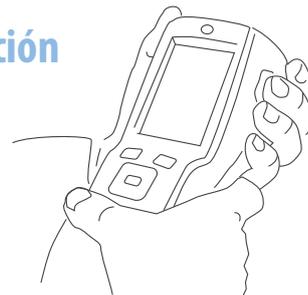

```

Fecha/Hora:
09 MAY 2016 14:46
Test ID:
10003170_00000036
Cartucho Número:
00001947
Lot#:
00102327
Nombre del Analizador:

N/S del Analizador:
10003170
Estado del Analizador:
Mantenimiento Requerido
Resultados del test:
=====
Cartucho:
0052-404
COC NEGATIVO
OPT NEGATIVO
MAMP NEGATIVO
THC POSITIVO
AMP NEGATIVO
    
```

Ventajas

- Sin manipulación, recogida de muestra de forma sencilla e higiénica.
- Equipo más fiable del mercado, verificación de instrumental antes de uso.
- Resultados en 5 minutos. En pantalla se muestran los datos del test.
- Impresión de resultados en papel.
- Detecta diferentes sustancias: THC cannabis, cocaína, opiáceos, metanfetaminas y anfetaminas.
- Precisión, sensibilidad a THC de 25 ng/ml.
- Alta capacidad de almacenamiento de pruebas, más de 10.000 test.
- Software de gestión de datos.





La hora del control...

Instrumental

Suministramos todo el instrumental necesario para realizar una campaña de control de principio a fin. Desde la recogida de la muestra hasta la prueba confirmatoria le facilitamos: quantisal, sobre cadena custodia y etiquetado de seguridad para su envío a laboratorio.



Pack SoToxa™

1. Analizador portátil
2. Impresora y cable
3. Cartuchos control de calidad QC
4. Fuente de alimentación
5. Guía de uso CD-ROM
6. Maleta de transporte
7. Cable Micro USB para conexión a PC

Pack Test

- Cartucho de análisis con tiras reactivas
- Colector de saliva



Prueba confirmatoria

- Cuantisal
- Sobre cadena de custodia
- Etiquetado de seguridad



Pasos del control


Control de calidad

- 1 Encienda el equipo y realice las pruebas de calibración PQC y NQC, introduciendo cada cartucho siguiendo indicaciones en pantalla.
- 2 Una vez chequeados y comprobado su óptimo estado puede iniciar la prueba.



Recogida de muestra

- 3 Entregue al conductor sobre con cartucho de tiras reactivas para que lo abra en su presencia.
- 4 Inserte el cartucho en el analizador con el código Q hacia arriba y a la derecha.
- 5 Entregue al conductor dispositivo colector de saliva para que lo abra en su presencia.
- 6 El conductor deberá empapar con saliva suficiente el colector hasta que el indicador se vuelva de color azul.
- 7 Introduzca el colector en el cartucho de tiras reactivas presionando de forma continua hasta que quede completamente encajado.

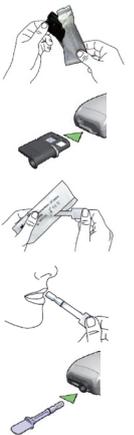

Análisis

- 8 Una vez insertado, en la pantalla se mostrará el cronómetro indicándole el tiempo de espera para que finalice la prueba.
- 9 A los 5 minutos aparecerá el resultado de la prueba mostrando los datos (positivo o negativo) de las sustancias analizadas.
- 10 Imprima el resultado pulsando "imprimir OK". Previamente compruebe que la impresora esta encendida y con el cable conectado.
- 11 En caso de obtener resultado positivo en alguna sustancia, proceda a realizar prueba confirmatoria.



Prueba confirmatoria de positivos

- 12 Empapar con saliva el colector hasta que indicador se vuelva azul.
- 13 Introducir colector en el tubo con conservante y cerrar.
- 14 Enviar a laboratorio garantizando cadena de custodia.